


## ペットケアモニター交換用 上部ユニット(HN-PC503) 取扱説明書

このたびは、「ペットケアモニター交換用上部ユニット」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ペットケアモニター交換用上部ユニットをご利用の前に、この説明書とペットケアモニターの説明書をご覧になり、正しくお取り扱いください。
- この説明書をご覧いただいたあとは、大切に保管してください。

構成品

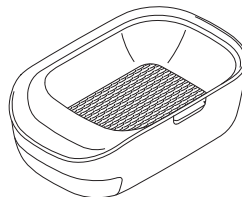

- ペットケアモニター交換用上部ユニット(一式) × 1
- スコップ × 1
- 取扱説明書(本書) × 1

### 安全上のご注意

人への危害、財産への損害を防ぐため、お守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使いかたで生じる内容を、次のように区分して説明しています。

	<b>危険</b>	「死亡または重傷を負うおそれが高い」内容。
	<b>警告</b>	「死亡または重傷を負うおそれがある」内容。
	<b>注意</b>	「軽傷を負う、または財産に損害を受けるおそれがある」内容。

■ お守りいただく内容の種類を、次の図記号で説明しています。

	してはいけないこと。
	しなければならないこと。

### 警告 火災や感電、けがを防ぐために


- 取扱説明書に記載以外の用途には使わない。  
(故障・火災の原因)
- 高温になる場所や熱のこもりやすい場所(火のそば、暖房器具のそば、こたつや布団の中、空調機の風が直接当たる場所、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など)で使用、保管、放置しない。  
(火災・やけど・けが・故障・変形の原因)
- 熱湯をかけない。  
(やけど・変形の原因)
- 屋外での使用はしない。  
(器具損傷・火災の原因)
- 乳幼児の手の届くところで使用したり置かない。  
(感電・けがの原因)
- 落下させる、踏みつける、投げつける、上から物を落とすなど強い力や衝撃、振動を与えない。  
(火災・やけど・けが・感電・故障の原因)
- 破損したまま使用しない。  
(感電・けがの原因)
- ペットケアモニター以外の製品には使用しない。  
(火災・感電・故障の原因)
- 使用中、保管中に、異臭、異音、発煙、発熱、変色、変形などの異常がみられた場合や故障がうたがわれる場合は、「お問い合わせ先」に相談する。  
(火災・やけど・感電の原因)

### 注意 漏電やけがを防ぎ、家財などを守るために

- 不安定な場所や障害物の近くでは使用しない。  
(破損・故障・けがの原因)
- 製品を引きずらない。  
(破損・床に傷が付く原因)
- ペットを乗せたまま持ち運びしない。  
(破損・故障・けがの原因)

## セット内容

### ■上部ユニット

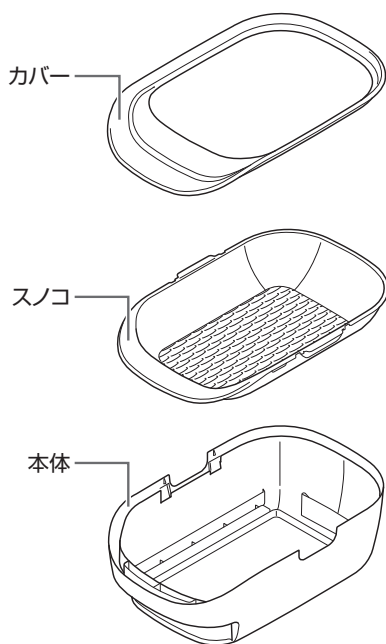

### ■スコップ



※ 組み立て方法については、ペットケアモニターに付属の「取扱説明書」をご覧ください。

## 使用上のご注意

- 極端な高温、低温での使用はおやめください。
- 上部ユニットを移動するときは、必ず上部ユニットの下部を持って運んでください。傾けて移動すると、引き出し部がすべり出るおそれがあります。
- 本製品を廃棄するときは、お住まいの地域のルールに従ってください。
- 本製品および本書の内容は、改良のため予告なく変更することがあります。

## お手入れのしかた

- 汚れたときは、上部ユニットを洗い、よく乾かしてください。室外では陰干しをしてください。

## 仕様

サイズ(幅×奥行×高さ)	約380mm×約576mm×約188mm(取っ手部含む)
重量	約2.4kg

※ 製品改良のため仕様の一部を予告なく変更することがあります。

## お問い合わせ先のご案内

修理・使いかたなどのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した場合は下記窓口にお問い合わせください。

### ■お問い合わせ先

コールセンター

電話番号 050-3852-5211

受付時間 10:00～17:00(年末年始を除く)

ペットヘルスケアサポートページ

<https://pethealthcare.sharp.co.jp/support/>

スマートフォンや  
携帯電話はこちらから



## シャープ株式会社

本社 〒590-8522 大阪府堺市堺区匠町1番地

IoT事業本部 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号

TINSJB342AFZZ 18G①